

Manuel d'utilisation Fauteuil Podo-PM05



Traduction suivant la notice originale du constructeur.

INDEX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Pages 2-3
SYMBOLES UTILISES	Page 4
RECOMMANDATIONS	Page 5
COMMANDES AU PIED	Page 6
ROTATION	Page 6
JAMBIERES	Page 6
ACCOUDOIRS	Page 6
IDENTIFICATION	Page 6
NETTOYAGE ET DESINFECTION	Page 7
MANUTENTION ORDINAIRE	Page 7
OPTIONS	Page 8

Nous vous remercions de nous avoir accordé votre confiance en choisissant notre matériel.

Avant d'utiliser le fauteuil nous vous prions de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le garder précieusement, il vous permettra d'utiliser au mieux le fauteuil dans le temps, les performances, la sécurité et la fiabilité .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V 50 Hz
Voltage	24 V
Consommation du fauteuil	350 W
Poids maximum de soulèvement	210 Kg
Poids maximum sur jambièrè	25 Kg
Poids maximum sur accoudoir	35 Kg
Poids maximum sur le dossier	65 Kg
Poids du fauteuil	95 Kg

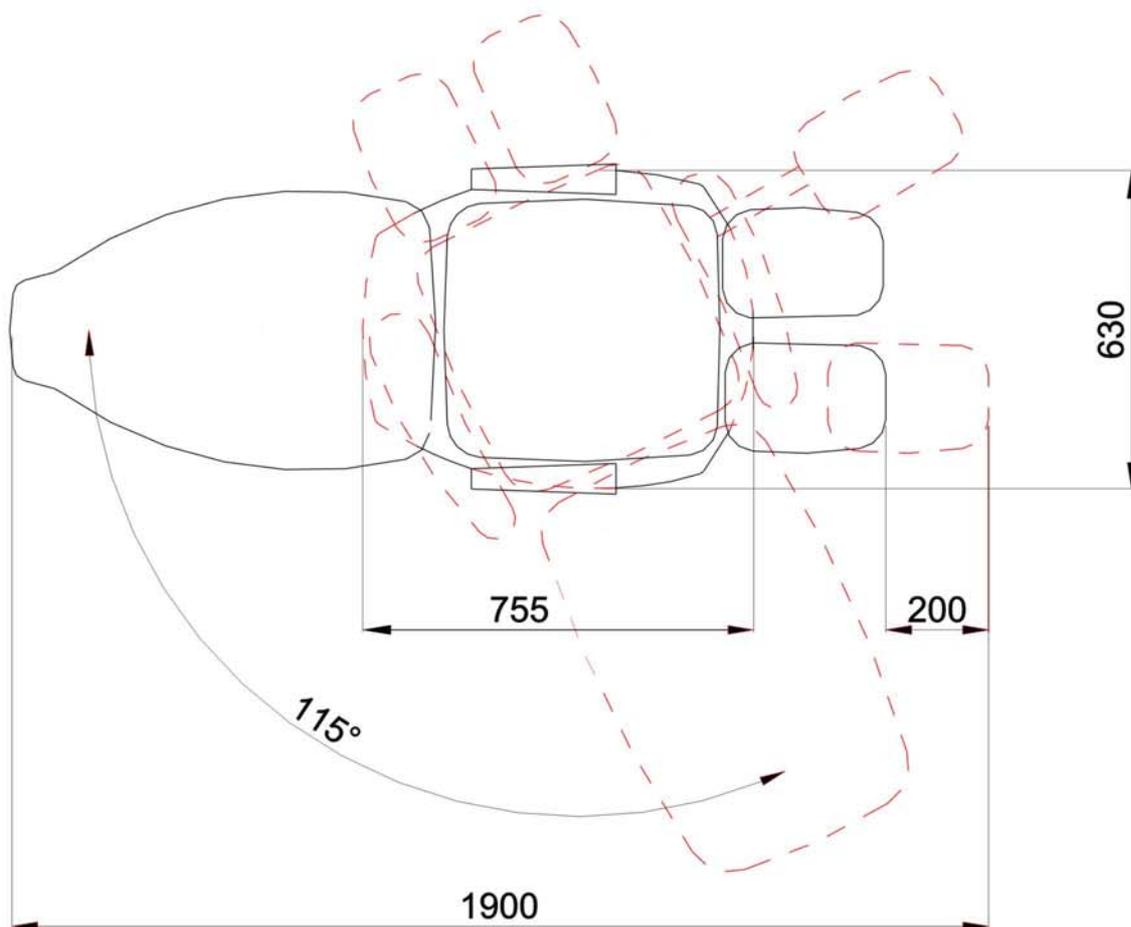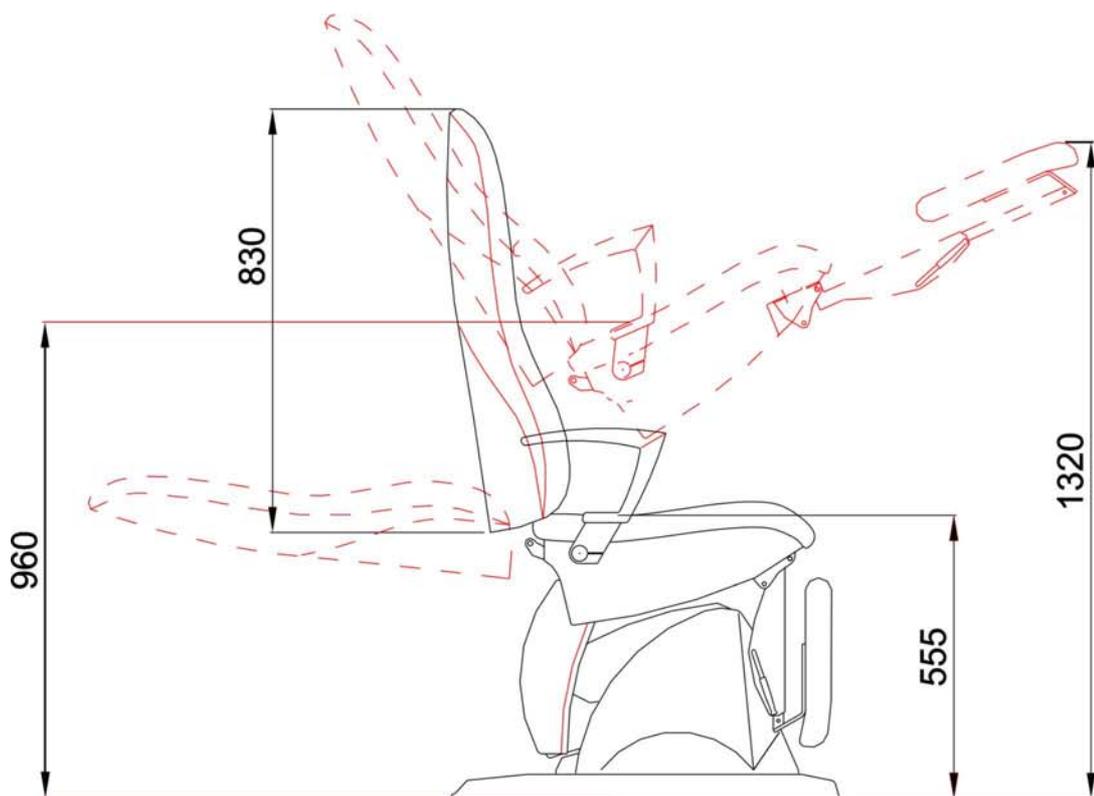

Dimensions du fauteuil

SYMBOLES UTILISES

Courant alternatif



Appareil de classe I Type B



Tension 230v



ATTENTION : Consulter le manuel d'utilisation avant tous usages



Conforme à la directive 93/42/CEE « MEDICAL DEVICES »



RECOMMANDATIONS

L'utilisation du fauteuil de podologie et de pédicurie est réservée, pour réaliser des soins ambulatoires sur les pieds.

Le fauteuil ne peut pas être utilisé en présence de produits inflammables, dans le traitement des patients avec appareillage cardio stimulateur ou similaires, il faudrait prendre les précautions nécessaires.

A ce propos se rapporter à la littérature spécifique en la matière.

Ne pas dépasser les poids indiqués dans la section « Caractéristiques techniques ».

Ne pas retirer les étiquettes placées sur le fauteuil.

En cas de détérioration prévoir le remplacement par des pièces d'origines.


ALIMENTATION

Vous assurer que l'alimentation électrique du fauteuil soit protégées par un disjoncteur différentiel de 16 A et de 10 MA. S'assurer que le fauteuil soit alimenté correctement.

S'assurer que le réseau électrique d'alimentation sera muni d'une mise à la terre conforme et efficace, et que la mise en marche de l'appareil respecte la législation en vigueur.

Le fabricant décline sa responsabilité pour tous les dégâts dus à la non-observation des précautions et des instructions reportées dans ce manuel.

COMMANDES AU PIED

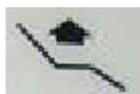

Montée et inclinaison de l'assise.



Descente et diminution de l'inclinaison de l'assise.



Montée du dossier.



Descente du dossier.



ROTATION

Le fauteuil peut tourner à 230° sur un plan horizontal.

Le levier « 5 » permet de libérer ou de bloquer la rotation du fauteuil.



JAMBIERES

Les jambières sont montées sur guide télescopique à frictions avec écartement de 30° +30° elles ont un mouvement vertical de 90° commandé par des poignées latérales.

L'écartement des jambières s'effectue par un mouvement de translation vers la droite ou vers la gauche.

Jambières réglable en longueur par glissement sur son axe.
(Tirer et pousser)



ACCOUDOIRS

Les accoudoirs sont rabattables pour favoriser la montée et la descente du patient sur le fauteuil.
(voir flèche sur photo)



IDENTIFICATION

Le fauteuil s'identifie par le matricule placé dans la zone indiquée par la flèche.

Si vous demandez l'assistance technique ou si vous commandez des pièces de rechange il faut toujours donner le numéro de série du fauteuil.



NETTOYAGE ET DESINFECTION

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces externes du fauteuil (pièces plastique, vernis et tapisserie) utiliser des désinfectants disponibles en commerce, vérifier que les substances qui sont dans les produits désinfectants soient conformes aux précisions données ci-dessous.

RECOMMANDATION

Ne pas dépasser la concentration indiquée.

Ne pas utiliser produits avec alcool, ammoniacque, substances abrasives et benzol.

Passer un linge humide d'eau sur les parties désinfectées.

(Les désinfectants même si délayés peuvent abîmer les surfaces.)

- ° Aldéhyde glutérique 2% : 10%
- ° Ethanol 96% : 40%
- ° Formaldéhyde 0,01%
- ° Glyoxal 0,15%
- ° Propanol 35%

Les produits doivent être utilisés avec un linge souple, mouillé de désinfectant.

Ne pas vaporiser directement le désinfectant sur l'appareil pour éviter l'infiltration qui pourrait endommager son fonctionnement.

MANUTENTION ORDINAIRE

Le fauteuil PODO PM05 ne nécessite pas des manutentions particulières.

Toutefois pour son déplacement ou transport , se reporter au manuel technique de montage.

OPTIONS



PM45020 KIT COUSSIN TETIERE



PM 45010 KIT DE 2 AUGETTES



PM15010
ACCOUDOIRS PEINT GRIS



PM15020
ACCOUDOIRS CHROME